

TAVAPROTSEDUUR



SÖÖVITUSTEHNIKA VALIK




Söövitage 10-15 sek., loputage 5 sek. Ja kuivatage.

INTRAORAALNE PARANDUSTÖÖ



PREPAREERITUD DENTIINI HERMETISEERIMINE

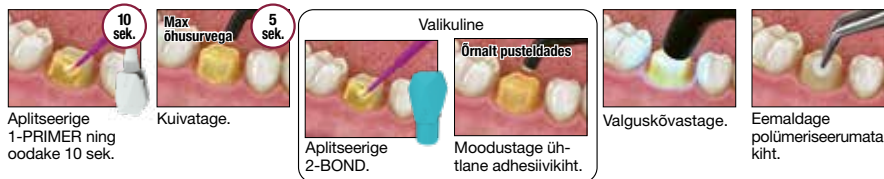

VALGUSKÕVASTAMISE AEG

Valgusseade	Kaugus valgusjuhi otsast	
	<10mm	>10mm
Halogeen/LED (700-1200 mW/cm ²)	10 sek.	20 sek.
Kõrge võimsusega LED (rohkem kui 1200 mW/cm ²)	5 sek.	10 sek.

LIHTSAMAKS KASUTAMISEKS



Loksutage pudelit ning tilgutage 1-PRIMER number "1" ühekordsele alusele.



Tilgutage 2-BOND number "2" ühekordsele alusele.

Doseerimise hõlbustamiseks pigistage pudeli katte ülaosa (kohta, kuhu number on graveeritud).

Kas te hoiate 2-BOND'i külmikus?

Külm vedelik on viskoosne ja seda võib olla raske tilgutada, seega palun **hoidke** 2-BOND pudelit enne kasutamist **toatemperatuuril**.

Kas 2-BOND hakkab otsa saama?

Pudel on disainitud nii, et seda saab hoiustada tagurpidi. Selline hoiustamisviis lihtsustab vedeliku väljutamist, eriti juhul, kui pudel hakkab tühjaks saama.



Kasutage pudelikatete omadusi maksimaalselt ära!

G2-BOND Universalil on ainulaadne pakend, mis on väga **ergonoomiline**. Pudelite katted 1 ja 2 vastavad toote pudelikorkide värvile ja siltidele. Seega tuleb pudelitele katted enne kasutamist õigesti ümber panna.

Miks peaks kasutama pudelite katteid:

- Katted **kaitsevad liigse soojuse eest** ning piiravad aurustumist.
- Katted **võimaldavad täpset kontrollitud tilgutamist** alusele ning ühtlasi minimeerivad materjali raiskamist.
- Katete disain optimeerib **täpse vajutuse**, mis on vajalik tilkade väljapressimiseks kummagi pudeli puhul, sõltuvalt viskoossusest.
- Katted on **korduskasutatavad**, seega on need keskkonnasõbralikud.
- Katted on **lihtsasti puhastatavad** vee või alkoholiga.
- Autoklaavi ja muid keemilisi lahuseid ei tohiks kasutada.

