

# Septoject

Steriilsed roostevabast terasest silikoonitud hambanõelad kaldmärgistusega

## Septoject XL

Steriilsed roostevabast terasest silikoonitud hambanõelad kaldmärgistusega – suurema siseläbimõõduga nõelad

### NÄIDUSTUSED

Nõelad on näidustatud tavapärase kohaliku tuimestuse süstide jaoks hambaravis.

Nõelad on ette nähtud maksillofatsiaalseks süstimiseks.

### VASTUNÄIDUSTUS

Ülitundlikkus koostisosade suhtes.

### KASUTUSJUHEND

- Murdke steriilsuse garantiipitser vahetult enne kasutamist lahti, keerates kaitseümbrise kahte osa vastassuundades.
- Kruvige eelkeermestatud nõel süstla eelkeermestatud nõelakaitsme külge.
- Eemaldage plastkork vahetult enne süstimist. Seda saab uuesti kasutada nõela süstlast eemaldamiseks, et vältida nõelatorke vigastuse ohtu.
- Visake kasutatud nõel torkekindlasse konteinerisse vastavalt kõigile kehtivatele meditsiinijäätmete eeskirjadele.

### HOIATUSED

- Ärge kunagi pange nõelale korki peale käsitsi. Kasutage ainult heakskiidetud hambakatmise protseduure. Nõelale käsitsi korgi pealepanemine või paindunud nõelale korgi peale panemine võib põhjustada kogemata nõelaga torkamist.
- Ärge painutage, murdke ega pingutage muul viisil nõelu, kuna see võib põhjustada tõsiseid vigastusi teile ja/või teie patsiendile.
- Ärge sisestage süstimise ajal nõela ühenduskohta, kuna nõelad võivad puruneda ja patsiendi kudedesse kinni jääda, põhjustades potentsiaalselt tõsiseid püsivaid vigastusi. Ärge kasutage lühikesi nõelu (< 30 mm), kui pehmete kudede eeldatav läbistussügavus läheneb nõela pikkusele.
- Vältige süstimise ajal äärmuslikku survet ja nõela liigset liigutamist, kuna see võib põhjustada nõelte purunemise, mis omakorda võib teile ja/või teie patsiendile tõsiseid vigastusi tekitada.
- Olge eriti valvas nõela ümberpaigutamisel patsiendil, kes näib olevat kartlik.
- Septoject XL-i puhul: vältige liiga kiiret süstimist ja/või liigset survet, kuna see võib süstimise ajal patsiendi valu suurendada.

### ETTEVAATUSABINÕUD KASUTAMISEL

- Hoida originaalpakendis kuni kasutamiseni.
- Lugege oma süsteseadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.
- Kui kaitsekile on katki, siis EI OLE nõel STERIILNE JA SEDA EI TOHI KASUTADA.
- Ainult ühekordseks kasutuseks: see seade on mõeldud kasutamiseks ühel patsiendil. Igasugune korduskasutamine teeb teised patsiendid ja kasutaja vastuvõtlikuks tõsiste ohtudele, sh infektsioonidele ja traumadele, kuna nõel ei ole enam steriilne ja võib puruneda.
- Kui on vaja mitut süsti, vahetage iga kassetti nõel välja, et minimeerida nõelaotsa kahjustuse ohtu.

### 1 patsient / 1 kassett / 1 nõel

- Nõuanded Septoject XL nõelte esmakordsele kasutamisele: kuna XL nõeltel on suurem valendik (läbimõõt) kui teistel nõeltel, tuleb enne süstimist pehme kude stabiliseerida, et vähendada nõela kõrvalekalde ohtu.

- Nõela valik sõltub sellest, mille jaoks spetsialist seda kasutab.

## HOIUSTAMINE

Mitte hoida temperatuuril üle 30°C ja kaitsta niiskuse eest.

## ESITLUS

100 kaheotsalist ühekordset hambanõela, mida ei saa uuesti steriliseerida.

*Ainult professionaalseks hambaraviks*

**Steriliseeritakse kiiritamise või etüleenoksiidi abil**



 SEPTODONT

58, rue du Pont de Créteil

94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex

Prantsusmaa

Tel: 33(0) 1 49 76 70 00



Maksimaalselt  
30°C



## SEPTOJECT

Tailles d'aiguilles disponibles / Saadaval olevad nõelte suurused	En mm (S.I.) / Millimeetrites (I.S.)	Diamètre en Gauge / Gabariidi läbimõõt	Type d'injection / Süstimise tüüp
Extra-Courte / Ekstra lühike	0,3 x 0,8 mm	30 Ga	Intraligamentaire / Intraligamentaarne
Extra-Courte / Ekstra lühike	0,3 x 10 mm	30 Ga	Intraligamentaire / Intraligamentaarne
Extra-Courte / Ekstra lühike	0,3 x 12 mm	30 Ga	Intraligamentaire / Intraligamentaarne
Courte / Lühike	0,3 x 16 mm	30 Ga	Para-apicale / Periapikaalne
Courte / Lühike	0,3 x 21 mm	30 Ga	Para-apicale / Periapikaalne
Courte / Lühike	0,3 x 23 mm	30 Ga	Para-apicale / Periapikaalne
Courte / Lühike	0,3 x 25 mm	30 Ga	Para-apicale / Periapikaalne
Extra-Courte / Ekstra lühike	0,4 x 0,8 mm	27 Ga	Intraseptale / Intraseptaalne
Extra-Courte / Ekstra lühike	0,4 x 12 mm	27 Ga	Intraseptale / Intraseptaalne
Courte / Lühike	0,4 x 16 mm	27 Ga	Para-apicale / Periapikaalne
Courte / Lühike	0,4 x 21 mm	27 Ga	Para-apicale / Periapikaalne
Courte / Lühike	0,4 x 23 mm	27 Ga	Para-apicale / Periapikaalne
Courte / Lühike	0,4 x 25 mm	27 Ga	Para-apicale / Periapikaalne
Longue / Pikk	0,4 x 35 mm	27 Ga	Tronculaire / Närviblokk
Longue / Pikk	0,4 x 42 mm	27 Ga	Tronculaire / Närviblokk
Extra-Courte / Ekstra lühike	0,5 x 0,8 mm	25 Ga	Intraseptale / Intraseptaalne
Courte / Lühike	0,5 x 25 mm	25 Ga	Para-apicale / Periapikaalne
Longue / Pikk	0,5 x 35 mm	25 Ga	Tronculaire / Närviblokk
Longue / Pikk	0,5 x 42 mm	25 Ga	Tronculaire / Närviblokk

**SEPTOJECT XL**

Tailles d'aiguilles disponibles / Saadaval olevad nõelte suurused	En mm (S.I.) / Millimeetrites (I.S.)	Diamètre en Gauge / Gabariidi läbimõõt	Type d'injection / Süstimise tüüp
Extra-Courte / Ekstra lühike	0,3 x 10 mm	30 Ga	Intraligamentaire / Intraligamentaarne
Extra-Courte / Ekstra lühike	0,3 x 12 mm	30 Ga	Intraligamentaire / Intraligamentaarne
Courte / Lühike	0,3 x 16 mm	30 Ga	Para-apicale / Periapikaalne
Courte / Lühike	0,3 x 21 mm	30 Ga	Para-apicale / Periapikaalne
Courte / Lühike	0,3 x 23 mm	30 Ga	Para-apicale / Periapikaalne
Courte / Lühike	0,3 x 25 mm	30 Ga	Para-apicale / Periapikaalne
Extra-Courte / Ekstra lühike	0,4 x 0,8 mm	27 Ga	Intraseptale / Intraseptaalne
Courte / Lühike	0,4 x 16 mm	27 Ga	Para-apicale / Periapikaalne
Courte / Lühike	0,4 x 21 mm	27 Ga	Para-apicale / Periapikaalne
Courte / Lühike	0,4 x 25 mm	27 Ga	Para-apicale / Periapikaalne
Longue / Pikk	0,4 x 35 mm	27 Ga	Tronculaire / Närviblokk
Longue / Pikk	0,4 x 42 mm	27 Ga	Tronculaire / Närviblokk