

# Flex & Shine


---

## Enhance<sup>®</sup> Flex

### Lõppviimistluse ja poleerimissüsteem

Enhance<sup>®</sup> Flex süsteemil on painduvad servad, mis adapteeruvad hambapinna iga kumerusega, nii esi- kui ka tagahammaste puhul. Tänu millele läheb Sul vaja vaid ühte kuju kõikide enda komposiitrestauratsioonide jaoks. See on lihtne


Suurepäraseid poleerimistulemusi ja intuitiivne kasutamine pakuvad täiendavaid eeliseid. Ja kuna see on kuni 10 korda uuesti kasutatav, on teil vähem jäätmeid ja kulusid.

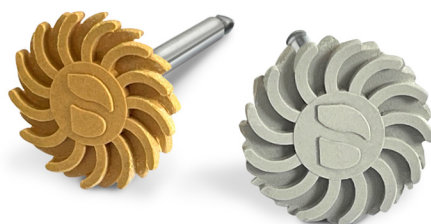

# Kui lihtne kasutamine kindlustab edukat lõpptulemust

## Üks kuju iga hambapinna jaoks

Eriline diskikujuline ja ümarate servadega vorm adapteerub iga hambapinna kumerusega.

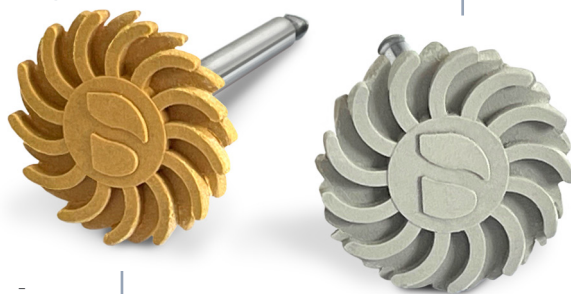

## Lai kasutamine

Enhance® Flex on sobiv kõikide komposiitmaterjalide viimistlemiseks ja on kujundatud hamba pinna säästmiseks.

## Hiilgav poleerimistulemus


Patsiendile nauditav esteetiline tulemus ja arstile lihtne kasutus.

## Erakordne vastupidavus

Säästa aega ja raha - taaskasutatav kuni 10 korda

<b>Pöörlemiskiiruse juhendid:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Soovitatav kiirus on 3000–8000 p/min. Ärge kunagi ületage maksimaalset pöörlemiskiirust (20 000 p/min).</li><li>• Maksimaalse pöörlemiskiiruse ületamisel kipuvad poleerijad vibreerima. Taoline vibreerimine võib poleerija hävitada, kruvi deformeerida ja/või põhjustada seadme purunemist. Selle tulemusena võivad kasutaja, patsient ja kolmandad osapooled vigu saada.</li><li>• Soovitatava kiirusvahemiku järgimise tulemuseks on parimad võimalikud töötulemused.</li></ul> <p><b>Maksimaalse lubatud kiiruse mittejärgimine toob kaasa suurema ohutusrisi.</b></p>
<b>Surve avaldamine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liigne surve võib poleerija hävitada.</li><li>• Liigne surve tekitab suuremat kuumust.</li><li>• Liigne surve võib tuua kaasa poleerija suurema kulumise.</li></ul> <p><b>Liigset survet tuleb vältida, kuna see põhjustab ülekuumenemist, mis võib hambajuurt kahjustada. Äärmuslikel juhtudel võivad instrumendid katki minna ja põhjustada vigastusi.</b></p>
<b>Vesijahutus:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Soovimatu hambale kuumuse tekkimise vältimiseks on vajalik piisav vesijahutus (vähemalt 50 ml/min).</li></ul> <p><b>Ebapiisav vesijahutus võib tuua kaasa hamba ja selle ümber oleva koe pöördumatu kahjustumise.</b></p>

Loomuliku esteetika saavutamiseks proovi Spectra ST\* komposiiti ja Enhance® Flex poleere.

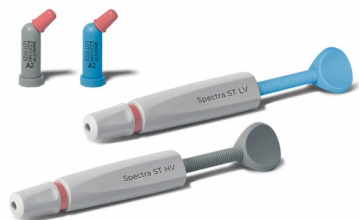

Starting Point: Class IV restoration



Final result: Spectra ST A2 Cloud™ shade and D1 opaque dentin shade. Finished & polished with Enhance® Flex.

## Tellimisinfo: Enhance® Flex

**Alustuskomplekt**  
**624095**

3x Finishers  
3x Polishers

**Finisher 624090**

6x Finishers

**Polisher 624085**

6x Polishers

