

# Tugev meeskond imusüsteemidele

## Igapäevaselt Orotol® plus

"Orotol® plus on efektiivne kontsentraat kõikide hambaravis kasutatavate süljekausside, imusüsteemide ja amalgaamiseparaatorite desinfektsiooniks, puhastamiseks, hoolduseks ning lõhnastamiseks."

1. Eeltöötlus: tõmmake 2 liitrit vett
2. Pange lahus hooldussüsteemi. \*  
Raviseadme jaoks: valage 20 ml (1 doseerimiskork), täitke 1 liitrini külma veega ja segage hoolikalt (kahekordista kogused 2 raviseadme puhul)
3. Kinnitage imemisvoolikud hooldussüsteemi külge ja image lahus
4. Lisage veel 1 liiter ja valage see süljekaussi.
5. Lase reageerida vähemalt 1 tund või üleöö
6. Pärast reaktsiooniaega / järgmisel hommikul imege 2 liitrit vett süsteemi



## Iganädalane MD 555 cleaner

MD 555 puhastusvahend on spetsiaalne imusüsteemidele ja amalgaamiseparaatoritele. See eemaldab jääkained, katlakivi ja ummistused. Seda kasutatakse 1-2 korda nädalas (nt teisipäev ja Neljapäev), suurema koormuse puhul, iga päev enne lõunapausi.

1. Eeltöötlus: tõmmake 2 liitrit vett
2. Pange lahus hooldussüsteemi. \*  
Raviseadme jaoks: valage 50 ml (2,5 doseerimiskorki), täitke 1 liitrini külma veega ja segage hoolikalt (kahekordista kogused 2 raviseadme puhul)
3. Kinnitage imemisvoolikud hooldussüsteemi külge ja image lahus
4. Lisage veel 1 liiter ja valage see süljekaussi.
5. Lase reageerida vähemalt 0,5 kuni 2 tundi (lõunapausil)
6. Pärast reaktsiooniaega imege 2 liitrit vett süsteemi

\* Using a care system with suction hose adaptors to suck an air-solution mixture. Sucking without the respective adapter from the bowl or other container is not suitable for disinfection and cleaning. We recommend using the OroCup.