



**FD 300**  
**FD 312**  
Pinna desinfitseerimine



**FD 370 cleaner**  
Puhastusvahend  
Kirurgiainventari  
puhastamine



**ID 212**  
**ID 212 forte**  
**ID 213**  
Instrumentide  
desinfitseerimine



**Orotal® plus**  
Imusüsteemide  
desinfitseerimine



**MD 555 cleaner**  
Puhastusvahend Spetsiaalne  
imusüsteemi puhasti

Vajaliku koguse lahus	1 %		2 %		5 %	
	ml	Täite arv 2)	ml	Täite arv 2)	ml	Täite arv 2)
1 Liter/litre	–	–	20	1	–	–
2 Liter/litres	20	1	40	2	100	5
3 Liter/litres	–	–	60	3	–	–
4 Liter/litres	40	2	80	4	200	10
5 Liter/litres	–	–	100	5	–	–
6 Liter/litres	60	3	120	6	300	15
7 Liter/litres	–	–	140	7	–	–
8 Liter/litres	80	4	160	8	400	20
9 Liter/litres	–	–	180	9	–	–
10 Liter/litres	100	5	200	10	500	25

1) Verschussintegrierter Dosierer 20 ml. Dosierer innen bis zur ringförmigen Markierung befüllen.

2) Kork peaks olema täidetud 20 ml jooneni, mis on siseküjel märgitud.

FR Plan de dosage pour les concentrés

IT Tabella per il dosaggio dei concentrati



**FD 300**  
**FD 312**  
Désinfection des surfaces  
Disinfezione superfici



**FD 370 cleaner**  
Nettoyage du cabinet  
Per la pulizia dello studio



**ID 212**  
**ID 212 forte**  
**ID 213**  
Désinfection des instruments  
Disinfezione strumenti



**Oratal® plus**  
Désinfection des systèmes d'aspiration  
Disinfezione impianti di aspirazione



**MD 555 cleaner**  
Nettoyant spécial pour les systèmes d'aspiration  
Pulente speciale per impianti di aspirazione

Solution prête à l'emploi Soluzione pronta all'uso	1 %		2 %		5 %	
	ml	Bouchon <sup>1)</sup> tappo chiusura <sup>2)</sup>	ml	Bouchon <sup>1)</sup> tappo chiusura <sup>2)</sup>	ml	Bouchon <sup>1)</sup> tappo chiusura <sup>2)</sup>
1 litre/litro	–	–	20	1	–	–
2 litres/litri	20	1	40	2	100	5
3 litres/litri	–	–	60	3	–	–
4 litres/litri	40	2	80	4	200	10
5 litres/litri	–	–	100	5	–	–
6 litres/litri	60	3	120	6	300	15
7 litres/litri	–	–	140	7	–	–
8 litres/litri	80	4	160	8	400	20
9 litres/litri	–	–	180	9	–	–
10 litres/litri	100	5	200	10	500	25

<sup>1)</sup>Doseur de 20 ml intégré dans le bouchon. Remplir le doseur jusqu'au repère circulaire.

<sup>2)</sup>Tappo di chiusura con dosatore da 20 ml. Riempire il tappo dosatore sino al contrassegno.