

Näidustused:

1. Primaarsete või sekundaarsete kaariesekahjustuste ennetamine
2. Kaviteedi põhja pulbiriiumi kaitse
3. Mittekarioossete kahjustuste ennetamine, nt. erosioonid
4. Emaili mikrokahjustuste vähendamine
5. Esialgsete karioossete kahjustuste ravi, kui on toimunud ainult kudede demineralisatsioon
6. Dentiini ülitundlikkuse ravi

Rakendus:**Igal ravikorral kasutada ilmtingimata mõlemat ravilahust!**

Lisage pipetiga väike kogus lahust alusele (esimesena kasutada täiskasvanute laki puhul sinise korgiga lahust ja laste laki puhul punase korgiga pudelit). Kuivatage hammas süljest ja hõõruge hammast ulatuslikult lahusega immutatud vatitupsu või aplikaatoriga.

Kuivatamine ja vahepealne loputamine pole vajalik. Lisage väike kogus teise pudeli lahust (mõlemil valge korgiga pudel) eraldi alusele ja hõõruge põhjalikult uue vatitupsu või aplikaatoriga. Alles seejärel loputage veega! Kuivatama ega valgustama pinda ei pea!

Peale protseduuri võib patsient kohe nii süüa kui ka juua.

**Korda ravi vajadusel 1–2 korda 8–14 päeva möödumisel
Protseduuri võib kasutada maksimaalselt 1-2 korda aastas!****Koostis:**

Esimene lahus: Magneesiumheksafluorosilikaat, vask(II)heksafluorosilikaat, naatriumfluoriid (stabilisaatorina), ksülitool, sukraloos, maasika aroomi nat., destilleeritud vesi.

Teine lahus: tugevalt disperseeritud kaltsiumhüdroksiid, metüülselluloos, destilleeritud vesi.

Paketi sisu:

Pakendis on 20 ml + 20 ml mõlemat lahust ning pudelitele erineva värvusega pipetid

Näpunäide:

Lahuse kuivamise vältimiseks puhastage pudeli huul pärast kasutamist hoolikalt ja sulgege see tihedalt!