

Kasutusjuhend BIB forte eco



CE 0123

Teavet töötlemise kohta seoses töövoo ja standardse töökorraga (STK) saab meie veebilehelt www.alpro-medical.de, e-maili teel aadressil info@alpro-medical.de või telefonitsi numbril **+49 7225 9392-0**.














Sisukord

1. Kasutusjuhised	4
2. Tootekirjelduses, siltidel ja kasutusjuhistes kasutatud sümbolid	4
3. Sihtgrupp	4
4. Kasutusotstarve – Mõeldud kasutamiseks	4
5. Taotlus	5
6. Tellimisteave	6
7. Ohud ja ettevaatusabinõud	7
8. Keskkond ja kasutusest kõrvaldamine	7
9. Vahejuhtumitest teatamine	7

1. Kasutusjuhised

Järgige tähelepanelikult alltoodud juhiseid, et tagada töö sujuvus, tõhusus ja ohutus.

2. Tootekirjelduses, siltidel ja kasutusjuhistes kasutatud sümbolid

	Kasutage enne (aegumiskuupäev) AAAA-KK
	Partii number XXXXXX
	Konsulteerige elektroonilise kasutusjuhendiga (vt linki või QR-koodi)
	CE-märgis koos teavitatud asutusega (0123) klass IIa, IIb või III meditsiiniseadmetele
	EMÜ tähis valmis pakkeidele
	Tellimuse number
	Käsiinstrumentide ja pöörlevate instrumentide desinfitseerimisvahendid
 <small>Soaking bath</small>	(kasutatav) sukelvannis
	(kasutatav) ultraheliseadmes
	Tootja: ettevõtte ALPRO MEDICAL GMBH, St. Georgen
 <small>ALPRO MEDICAL GMBH</small>	Ettevõtte ALPRO MEDICAL GMBH, St. Georgen logo

3. Sihtgrupp

See kasutusjuhend on ette nähtud kõikidele meditsiini- ja hambaraviasutuste kasutajatele (arstid, hambaarstid ning meditsiiniseadmete eest vastutavad spetsialistid ja hügieenispetsialistid).

4. Kasutusotstarve – Mõeldud kasutamiseks

Vedelkontsentraat meditsiini- ja hambaraviinstrumentide, pöörlevate täppisinstrumentide ja endoskoopide puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Toode ei sisalda aldehüüde, fenooli ega kvarternaarseid ammooniumühendeid.

Desinfitseerimisel märkus:

- Kandke kaitsekindaid, vett mitteläbilaskvat põlle ja kaitseprille!
- Märgistage alus kasutusvalmis lahuse ettevalmistamise kuupäevaga (pikemaks kasutusperioodiks).
- Kasutusvalmis lahuse säilivusaeg: kasutamata = 30 päeva; kasutamisel lõplikuks desinfitseerimiseks = 7 päeva
- Kasutusiga: üldiselt kehtib 7-päevane kasutusiga, kui lahust kasutada üksnes eelnevalt puhastatud instrumentide desinfitseerimiseks. Kui lahust kasutada puhastamiseks ja/või saaste on silmaga nähtav, tuleb see iga tööpäev välja vahetada.

5. Taotlus



Desinfitseerimine – pärast eelpuhastust

- 5.1 Kallake alusele kontsentrati (vt tabelist) ja seejärel täitke veega (järgige täpset kogust)
(nt 0,5% \pm 5 ml/995 ml külma kraanivett = 60 min
2% \pm 20 ml/980 ml külma kraanivett = 30 min)
- 5.2 Kastke eelpuhastatud instrumentid täielikult ja ilma mullideta lahusesse
- 5.3 Järgige näidatud kontaktaega soovitud toime alusel (vt tabel)



	Toime	Kontsentratsioon/% Aeg/minutid	
Määratud tingimused * sukelvannis	bakteritsiidne (EN 13727, EN 14561)	0,5	5
	fungitsiidne (EN 13624, EN 14562)	3,0	5
	tuberkulotsiidne (EN 14563)	2,0	15
Puhtad tingimused *	virutsiidi (RKI/DVV) ümbrisega viiruste vastu, nt. HBV, HCV, HIV, gripp ja koroonaviirused	1,0	10
ultraheli-vannis	tuberkulotsiidne (EN 14563)	2,0	5
Määratud tingimused 30 °C	virutsiidi eelpuhastades AlproZyme ’iga 0,5 % (EN 16777) ümbriseeta adeno-, noro- ja parvoviiruste ning ümbriseega viiruste vastu, nt. HBV, HCV, HIV, gripp ja koroonaviirused	0,5	60

*tavaline kontaktaeg


Edasine töötlus

- 5.4 Loputage instrumendid veega (nt. deioniseeritud, demineraliseeritud/ joogivesi). Püsiva määrdumise korral puhastage vajadusel plastharjaga ja korrake desinfitseerimise etappe 5.2./5.3.
- 5.5 Kuivatage sobiva mittekootud lapiga või kuiva õhuga.
- 5.6 Kontrollige terviklikkust.
- 5.7 Jätkake sõltuvalt riskihinnangust instrumentide töötlemist (järgige standardset töökorda) mähitult või mähkimata, kasutades sobivat termilist meetodit (kinnitatud pesur-desinfitseerija/aurusteriliseerija)

6. Tellimisteave BIB forte eco

VIIDE	Kirjeldus	
3741	1 L dosaatorpudel	 CE 0123
3742	5 L kanister	 CE 0123

Tarvikud

VIIDE	Kirjeldus	
4018	Plastikust sukkelalus (4 L) taastöötlevaks desinfitseerimiseks kuni 60 °C juures	

7. Ohud ja ettevaatusabinõud

Ettevaatust. Tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel, allaneelamisel. Väga mürgine veeorganismidele. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab piperasiini. Võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.

NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontakt-läätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust **MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga**. Mitte segada hapete, aldehüüdi sisaldavate toodete või muude puhastus- ja desinfitseerimisvahenditega!

8. Keskkond ja kasutusest kõrvaldamine

0,5% kasutusvalmis lahus on ökoloogiliselt kahjutu.

Kõrge kontsentratsiooniga lahused saab väga lahjendatud kujul kõrvaldada reovette. Kasutamata toode ja toote jäägid tuleb kõrvaldada ohtlike jäätmetena nii direktiivi 2008/98/EÜ alusel jäätmete kohta kui ka riiklike ja kohalike määruste järgi. Võimalusel jätke toode algseesse anumasse.

Ärge segage teiste jäätmematerjalidega. Tootega saastunud pakendit loetakse ohtlikuks jäätmeks ja see tuleb vastavalt kõrvaldada.

Sisalduvad pindaktiivsed ained on OECD järgi biolagunevad

9. Vahejuhtumitest teatamine

Teatage kõikidest tõsistest vahejuhtumitest, mis tootega seoses võivad aset leida, järgmistele asutustele:

ALPRO MEDICAL GMBH

E-maili: quality@alpro-medical.de

Telefoni: **+49 7725 9392-0**

ja riiklik asutus



Teavet taastöötlemise kohta seoses töötlemise etappide ja kõikide kehtivate standardsete töökordade, ohutuskaartide, kasutusjuhenditega jne leiate meie veebilehelt: **www.alpro-medical.de**

Kui teil on küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust aadressil **www.alpro-medical.de** või telefonitsi numbril **+49 7725 9392-0**.

Samuti võite telefoni või e-maili teel ühendust võtta meie müügiesindajaga.