

MELAdest 65 kasutusjuhend

Vee destillaator

1. MELAdest 65 tööpõhimõte

Traditsiooniline vee destillaator toodab kõrgevaliteedilist destilleeritud vett, kasutades vee aurustamise põhimõtet. Sisselülitatud destillaatorist tõuseb vesi keemistemperatuurini, aur läbib ventileeritava jahuti ja aur muutub jällegi veeks. Vee temperatuur tõuseb 100 C, tappes kõik bakterid, viirused ja teised esineda võivad elusorganismid.

2. MELAdest 65 kasutamiseks ettevalmistamine

Kontrollige destilleerimis anumasse ja kogumisnõusse ei ole jäänud sisse pakkimismaterjali või muid valmistajatehase tootmisjääke. Kontrollimiseks toimige järgnevalt:

- 2.1 Asetage destillaator lauale.
- 2.2 Eemaldage jahuti toitejuhe.
- 2.3 Tõstes jahutit ülespoole eemaldage jahuti ja asetage kõrvale.
- 2.4 Kogumisnõu asetseb destillaatori sees.
- 2.5 Loputage roostevaba mahuti veega ja täitke mahuti ca 1,5L veega.
- 2.6 Asetage jahuti tagasi ja ühendage toitepistik.
- 2.7 Asetage kogumisnõu jahuti väljutusava külge.
- 2.8 Vajutage RESET nuppu juhul kui jahuti ventilaator ei hakka tööle. Tavaliselt on see tehases juba sisse lülitatud. Oodake kuni kogumisnõusse tuleb 2-3 tilka vett.
- 2.9 Ühendage lahti jahuti toitepistik KUID MITTE EEMALDADA JAHUTIT.
- 2.10 Aur läbides jahuti eemaldab kõikvõimalikud jäägid ja puhastab jahuti.
- 2.11 Destillaator lülitub automaatselt välja kui vesi keeduanumas on lõppenud.
- 2.12 Seejärel eemaldage toitejuhe.

3. Destilleeritud vee valmistamine

- 3.1 Eemaldage toitejuhe destillaatorist. Tõstke jahuti pealt ja asetage kõrvale.
- 3.2 Täitke veepaak märgini MAX. ca 4L vett
- 3.3 Asetage jahuti tagasi ja ühendage jahuti toitejuhe.
- 3.4 Asetage kogumisnõu jahuti väljutusava alla.
- 3.5 Ühendage toitejuhe seinakontakti.
- 3.6 Vajutage RESET nuppu ning ventilaator hakkab tööle (juhul kui ei tööta – kontrollige toitejuhet)
- 3.7 Kui tsükkel on lõppenud lülitub MELAdset 65 automaatselt välja.
- 3.8 Pärast jahutusmootori seiskumist oodake vähemalt 30 min. Enne jahuti eemaldamist.

ETTEVAATUST! ÄRGE EEMALDAGE JAHUTIT TÖÖTAMISE AJAL VÕI ENNE 30 MIN. MÖÖDUMIST PÄRAST SEISKUMIST. PÕLETUSE OHT AURU JA KEEVA VEEGA.

4. Puhastamine

- 4.1 Peale kasutamist loputada roostevaba keeduanum leige veega ja eemaldada sete.
- 4.2 Tugeva sette korral kasutada katlakivi eemaldamise vahendit (MELAG art. 01068 Eco Water destilleerimisanuma puhastuspulber.) Kasutusjuhendi leiate pudelilt.
- 4.3 Pesta pehma lapiga ja loputada.
- 4.4 TÄHELEPANU! Eco Water destilleerimisanuma puhastuspulbrit MITTE kasutada MELAdest65 vees.
- 4.5 Väljast puhastada seebi ja pehme lapiga.

5. Tehnilised andmed

SEADME TÜÜP	MELAdest 65
Kõrgus	38 cm
Diameeter	23 cm
Klaaskolvi mõõtmed	18 x 18.3 cm
Tühi kaal	4.2 kg
Mahutavus	1 l/h
Sestilleeritud vee juhtivus	2-3 µS/cm
ELEKTRIÜHENDUS	
Toiteallikas	230 V, 50/60 Hz
Maksimaalne elektri energia	800 W

Enne igakordset kasutamist kontrollige jahuti korrasolekut. Tihend peab olema korralikult oma soones ja vigastamata. Juhul kui tihend on paigast ära või katki tuleb aur jahuti servade vahelt välja.

Puhasta destillaatorit peale igakordset kasutamist.