

DEKASEPTOL GEEL

Hambaravis kasutatavate imuriseadmete ja süljekausside puhastus ja desinfektsioonivahend.

Dekaseptol geel on kasutusvalmis lahus geeli kujul. Lihtne kasutada - ei ole vaja segada erinevaid komponente omavahel. 1 Liitrisel pudelil kasutatava mõõtekorgi eeliseks on see, et käed ei puutu lahusega kokku.

Eelis teiste toodete ees- Geel kleepub torude siseseintele, ning seetõttu pikeneb vahendi antimikroobne toimeaeg.

TOIMESPEKTER : Bakteritsiidne, fungitsiidne, viirusiidne, sh. BHV, HIV ja adeno viiruse vastase toimega.

KOOSTIS: 100g toodet sisaldab toimeainetena

0,1g glukoprotamiini.

0,1g benzalkooniumkloriidi

0,25g dioktuul-dimetuul-ammooniumkloriidi.

Tootes kasutatud ained on vastavad OECD juhiste kergesti ja kiiresti biolagunevad.

KASUTUSALA: toode sobib paksu piserdustoru, peenikese süljetoru, süljekaasi ning kirurgilise imemistoru puhastamiseks ja desinfitseerimiseks.

KASUTAMINE: Paks piserdustoru : ime külma vett torusse, võta mõõtekork (15ml) ühe korra, ime Dekaseptol geel mõõtekorgist torusse, korda protseduure ja aseta toru paigale.

Peenike süljetoru :Ime külma vett torusse , vajuta mõõtekorki (15ml) ühe korra, ime Dekaseptol geel mõõtekorgist torusse, aseta toru paigale.

Süljekauss : Vajuta mõõtekorki (15ml) ühe korra, vala geel mõõtekorgist süljekaussi, aja vahend harjaga mööda kaussi laiali ja lase 5 minutit mõjuda. Harja ja loputa.

Kirurgiline imemistoru: Ime külma vett torusse vajuta mõõtekorki (15ml) ühe korra, ime geel torusse, aseta toru paigale.

NB! Peale ettenähtud toimeaega soovitame torud kindlasti läbi pesta, et vahend ei kuivaks toru sisekülgedele.

Tähelepanu! Vee temperatuur võib olla maksimaalselt +25C .

OHUTUSNÕUDED: Puutes kokku nahaga võib tekitada ärritust! Kindlasti kasutada kummikindaid. Ärritab silmi .

PH tase lahusel 10

Pakendid : 1 L pudel, 6L kanister.

Tootja esindaja : Ecolab SIA, Rītausmas iela 11B, LV1058 , Rīga, LATVIA

tel: +37167063773