



Chamber Protect

MELAG autoklaavikambri puhastuskomplekt

Usaldusväärne puhastus ja pikaajaline kaitse, mis jätab teie autoklaavi särama: uus MELAG kambri puhastuskomplekt eemaldab isegi mustuse, mis on silmale nähtamatu ja säästab seega kambri värvimuutustest ja ladestumistest.

Kasuta Chamber Protect puhastuskomplekt kambri ja kandikute puhastamisel kord nädalas:


- ✓ Võimas puhastusvahend koos 50 ebemevaba lapi ja 1 mikrofiber lapiga
- ✓ Eriti õm kambri ja uksetihendi materjali suhtes
- ✓ Heaks kiidetud materjalide ühilduvustestide abil
- ✓ Sobib ideaalselt kõigile MELAG aurusteriliseerijatele



Art.Nr.: ME01081



Sul on võimalus valida:

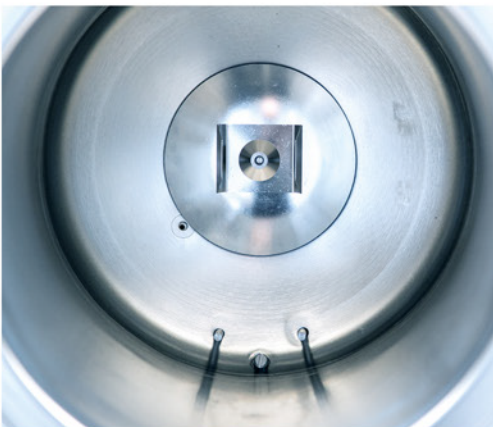

Chamber Protect
regulaarsel kasutamisel



Ilma regulaarse
kambri puhastuseta

Kuidas saada ideaalne tulemus?

Pikaajalise kaitse ja püsiva sära tagamiseks kasutage kambripuhastuskomplekti kord nädalas järgmiselt:



1. Pihusta Chamber Protecti autoklaavi

Avage autoklaavi uks, lülitage seade välja ja laske sellel jahtuda. Seejärel kandke umbes 2 pihustust Chamber Protecti ukse siseküljele ja umbes 15 pihustust kambrisse.


2. Hõõru Chamber Protect laiali

Hõõruge spray roostevabast terasest pindadele laiali ühe ebemevaba lapiga. Laske Chamber Protect sprayl umbes 3 minutit mõjuda.



3. Puhasta pinnad veega

Võtke teine ebemevaba lapp, tehke lapp ja autoklaavi kamber niiskeks piisava koguse demineraliseeritud veega (mõlema jaoks umbes 50 ml). Pühkige Chamber Protectiga pihustatud pinnad lapiga veelkord üle ja laske sellel veel umbes 5 minutit seista.

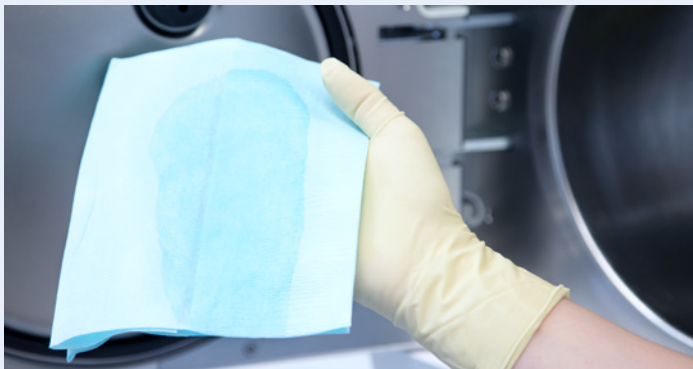

4. Kuivatage pinnad mikrofiiber lapiga

Lõpuks kuivatage ukse sisemus ja kogu kamber põhjalikult sinise mikrokiudlapiga. Autoklaav on nüüd instrumentide steriliseerimiseks taas kasutusvalmis.



For further information:
www.melag.com

MELAG
competence in hygiene