

Opalescence Whitening

valgendusgeel koduseks kasutamiseks

Opalescence PF hambavalgendusgeel pakub patsientidele võimalust valgendada hambaid oma kodus koos individuaalsete valgenduskapedega. Tänu lihtsale süstlaga pealekandmisele on Opalescence PF valgendusgeel hõlpsasti kohandatav iga patsiendi individuaalse olukorra jaoks. Geel sisaldab 20% vett, et vältida dehüdratsiooni. Selle kleepuv ja viskoosne konsistents aitab hoida geeli kapede sees paigal valgumata igametele.



1

Kandke ühtlane riba geeli hammaste labiaalsete pinade keskele. Ühe kasutusega kulub umbes 1/2 või 1/3 süstalt.



2

Asetage kape suhu surudes õrnalt mälumispindadele ning hoidke seda suus ette antud kasutusaja* vältel.



3

Võtke kape suust ning eemaldage liigne geel hammastelt puhta sõrme või pehme hambaharjaga. Ärge neelake geeli alla!



4

Puhastage kape kasutades pehmet harja ning loputage seda jooksva vee all. Hoistage kapet selleks ette nähtud kohta.

*Kasutusaeg: Opalescence 10% geel 8-10tundi või terve öö, Opalescence 15% geel 4-6tundi, Opalescence 20% geel 2-4tundi, Opalescence 35% geel 30-60minutit, Opalescence Quick 45% geel 15-30minutit.

HOIATUS! Ärge ületage lubatud kasutusaega! Ärge neelake geeli alla!