

# Opalescence Whitening

valgendusgeel koduseks kasutamiseks

Opalescence PF hambavalgendusgeel pakub patsientidele võimalust valgendada hambaid oma kodus koos individuaalsete valgenduskaapedega. Tänu lihtsale süstlaga pealekandmisele on Opalescence PF valgendusgeel hõlpsasti kohandatav iga patsiendi individuaalse olukorra jaoks. Geel sisaldab 20% vett, et vältida dehüdratsiooni. Selle kleepuv ja viskoosne konsistents aitab hoida geeli kaapede sees paigal valgumata igametele.



1

Kandke ühtlane riba geeli hammaste labiaalsete pinade keskele. Ühe kasutusega kulub umbes 1/2 või 1/3 süstalt.



2

Asetage kape suhu surudes õrnalt mälumispindadele ning hoidke seda suus ette antud kasutusaja\* vältel.



3

Võtke kape suust ning eemaldage liigne geel hammastelt puhta sõrme või pehme hambaharjaga. Ärge neelake geeli alla!



4

Puhastage kape kasutades pehmet harja ning loputage seda jooksva vee all. Hoistage kapet selleks ette nähtud kohta.

\*Kasutusaeg (päevas): Opalescence PF 10% geel 8-10tundi või terve öö, Opalescence PF 16% geel 4-6tundi, Opalescence GO 6% 60-90min.

**HOIATUS!** Ärge ületage lubatud kasutusaega! Ärge neelake geeli alla!