

AlproJet-W

Vedelkontsentraat hambaravi aspiratsiooni süsteemide iganädalaseks happevastaseks puhastamiseks ja hoolduseks koos amalgaamiseparaatoriga ja ilma selleta.

- aldehüüdide ja fenoolide vaba
- ei vahuta
- absoluutselt ohutu erinevate materjalide suhtes
- baasaineks sulfoonamiidhape

Toimespekter:

Puhastab, hooldab ning eemaldab mikroobid. Lahustab proteiini jäägid.

Kasutamine:

Tõhusaks puhastamiseks ja hooldamiseks soovitatakse kasutada **AlproJet-W**-d 2 päeva nädalas **AlproJet-D** asemel ning 2 korda päevas (lõunal ja õhtul) Kõrge proteiini jäägi puhul on soovitatav kasutada ka igapäevaselt **AlproJet-W**.

2 l 5 % valmislahust on soovitatav ära kasutada 1 korraga. Selleks doseerige 2 x 50 ml **AlproJet-W** kontsentraati kasutades dosaatorpudeli doseerimiskambrit ja segage sooja veega (40 - 50 °C) **AlproJet Mixcup** 2 l valmislahust. Seejärel aspireerige 1 l valmislahust läbi aspiratsioonivoolikute ja järelejäänud 1 l kallake süljekausi äravoolu.

Laske seejärel lahusel mõjuda vähemalt 30 minutit ning loputage veega aspiratsiooni voolikuid ja süljekaussi põhjalikult enne töö alustamist.

Süljekausi puhastamiseks soovitame **AlproCleaner** vahendit.