

# AlproJet-D

Desinfitseeriv vedeliku kontsentraat hambaraviseadme aspiratsioonisüsteemide igapäevaseks puhastamiseks ja hooldamiseks (nii koos kui ilma amalgaamiseparaatoriga/ta).

- aldehüüdide ja fenoolide vaba
- ei vahuta
- absoluutselt ohutu erinevate materjalide suhtes
- baasaineks naatriumhüdroksiid
- VAH sertifitseeritud

## Toimespekter:

Puhastab, hooldab ning eemaldab mikroobid (bakteritsiidne, fungitsiidne (Candida albicans), viirusi inaktiveeriv: HCV)

## Kasutamine:

Usaldusväärseks puhastamiseks, desinfitseerimiseks ja hooldamiseks on soovitatav **AlproJet-D** kasutada kolme järjestikuse tööpäeva jooksul 1 - 2 korda päevas (nt. lõuna ja õhtul). **AlproJet-W** kasutamine on soovitatav ülejäänud 2 tööpäeva jooksul.

Manuaalseks aplikatsiooniks **AlproJet MixCup** kannus: 2 l 5 % valmislahust on soovitatav ära kasutada 1 korraga. Selleks doseerige 2 x 50 ml **AlproJet-D** kontsentraati kasutades dosaatorpudeli doseerimiskambrit ja segage sooja veega (40-50 °C) **AlproJet Mixcup** 2 l valmislahust. Seejärel aspireerige 1 l valmislahust läbi aspiratsioonivoolikute ja järelejäänud 1 l kallake süljekausi äravoolu.

Laske seejärel lahusel mõjuda vähemalt 30 minutit ning loputage veega aspiratsioonivoolikuid ja süljekausi põhjalikult enne töö alustamist.

Seadmed, millel on sisseintegreeritud keemilise puhastuse funktsioon: Valage kontsentraat otse seadmesse selleks ettenähtud lahuse paaki. Segamisvahekord 5 %. Detailide täpsustamiseks pöörduge tootja või tootja esindaja poole.

Süljekausi puhastamiseks soovitage **AlproCleaner** vahendit.