



G-CEM ONE Universaalsed komplektid GC-It

Universal self-adhesive resin cement

Simply the ONE

AINUS...ja lihtne!

G-CEM ONE on tõeliselt universaalne isesidustuv vaiktsement, mis sobib kõikide näidustuste ning igat tüüpi restauratsioonide jaoks. Sõltuvalt preparatsioonist, võib valida kas lihtsa isesidustuva tsementeerimismeetodi või täielikult adhesiivse meetodi vahel.

G-CEM ONE`i võib valikuliselt kombineerida uuendusliku G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer`ga (AEP), et vajadusel tagada maksimaalne sidustugevus.

Alates märtsist 2023, soovitab GC nüüd ka ametlikult võimalust kombineerida G-CEM ONE universaalse adhesiiviga G-Premio BOND`ga.

Kas on soov saada kasu G-CEM ONE AEP puutekõvastumise funktsioonist (*touch cure*) ilma valguskõvastamiseta; või eelistate G-Premio BOND-i mitmeid näidustusi- ja valguskõvastumisvõimalusi, on alati olemas ideaalselt kohandatud lahendus.

➤ Nähtamatud servad esteetilisemaks tulemuseks:

- Kulumiskindlad servad
- Pikaajalised, stabiilse värviga esteetilised tulemused

➤ Puutekõvastumine (*Touch Cure*) ilma valguskõvastamiseta tänu G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer`le (AEP):

- Väga efektiivne pimedas kõvastumise (isekõvastumise) reaktsioon
- Ohutu ja kiire kõvastumine iga kliinilise olukorra puhul, eriti, kui valgusega juurdepääs on limiteeritud
- Lihtne protseduur: lihtsalt aplitseerige G-CEM ONE AEP, oodake 10 sekundit ning kuivatage – ei vaja valguskõvastamist!

➤ Lihtsustatud adhesiivne tsementeerimine tänu Universaalsele adhesiivile G-Premio BOND:

- Sisaldab kolme funktsionaalset monomeeri, mis tagavad optimaalse sidustugevuse. Üks sidusaine kõigi direktsete ja indirektsete restauratsioonide tarbeks!
- Auhinnatud pudeli kujundus väga täpseks aplitseerimiseks
- Lihtne protseduur: aplitseerige G-Premio BOND, oodake 10 sekundit, pusteldage õhuga, valguskõvastage 10 sekundit. Võimalik on vabalt valitud söövitusmeetod (isesöövituslik, valikuline söövitus, täissöövitus (*total-etch*)).

GC tutvustab kolme uut pakendit, milles G-CEM ONE on kombineeritud G-Premio BOND`ga, täiendmaks juba olemas olevaid pakendeid, mis sisaldavad G-CEM ONE AEP-d. See võimaldab lõppkasutajal valida eelistatud tsementeerimistehnika.





Palun tutvuge allolevas tabelis olevate hindadega.

Saadaval alates märtsist 2023

WEP		EEP		Product Name	Content	Suggested Retail Price (EUR)
OLD SAP Art. Code	S4/HANA Art. code	OLD SAP Art. Code	S4/HANA Art. code			
014543	10037114	014547	10037118	G-CEM ONE Universal Starter Kit A2	1x G-CEM ONE Syr.(4,6g), 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, 1x G-Premio BOND 5mL	€ 121.00
014544	10037115	014548	10037119	G-CEM ONE Universal Starter Kit Translucent		€ 121.00
014545	10037116	014549	10037120	G-CEM ONE Universal System Kit	1x G-CEM ONE Syr. A2 (4,6g), 1x G-CEM ONE Syr. TR (4,6g), 15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix endo tips 1x G-Premio BOND 5mL 1x G-Multi PRIMER 5mL	€ 173.30

Prices in EURO - V.A.T. excluded

